

# SIEGE RELEVEUR UP EASY

Référence 821076



## Conditions d'utilisation :

Les gens qui ont perdu suffisamment de force physique supérieure ou inférieure de se lever sans aide. Ceux qui ont perdu la mobilité en raison de :

- La dystrophie musculaire
- la maladie de lou Gehrig
- La sclérose latérale amyotrophique
- Post-opératoires
- Maladie dégénérative des articulations
- Arthrite
- Maladie de parkinson

## Mesures de sécurité :

La sécurité se trouve au cœur de la conception unique et breveté du UPEASY. Bien que votre nouveau produit UPEASY soit fait de manière à être le plus sécuritaire possible, vous devez prendre certaines précautions :

1. Assurez-vous de tenir fermement quelque chose quand vous vous levez. UPEASY a été conçu pour être utilisé dans les sièges qui ont des accoudoirs et dont la surface d'assise est d'une stabilité appropriée. Il n'y a habituellement pas de danger à utiliser le siège releveur up easy, dans les fauteuils, les sofas ou les sofas capitonnés. Il n'est cependant pas recommandé de se servir de ce siège releveur dans les automobiles ou les chaises de bureau dont les ne peuvent être bloquées.
2. Veillez toujours à ce que le fauteuil dans le quel vous installez UPEASY ne risque pas de glisser sur le plancher. En cas de doute, placez le dos du fauteuil contre un mur ou tout autre objet immobile.
3. Lorsque vous vous penchez pour ramasser un objet, ne vous appuyez pas sur vos pieds, sinon, le siège releveur UPEASY se mettre en action.



Pressez vers le BAS, de sorte que la partie rembourrée du siège se plie.

## Réglage du poids :

Placez le siège releveur UPEASY en position verticale de manière à ce qu'il repose sur le côté opposé à la poignée.

Pour ouvrir le siège UPEASY, détachez la bande Velcro qui se trouve autour de la poignée.


Pressez sur la partie rembourrée de la surface du siège, afin de l'amener à se plier vers l'extérieur. Cela permet de libérer le piston (le coussin UPEASY



Choisissez le réglage du cylindre qui convient à l'utilisateur.


est conçu pour se plier de cette même façon façon des milliers de fois. Cela n'endommagera pas l'appareil).

Choisissez un réglage de poids. Placez l'axe du piston au niveau du réglage qui convient à l'utilisateur, et assurez-vous qu'il s'ajuste fermement dans le cran d'arrêt correspondant au poids choisi. (Les nombres imprimés sur l'indicateur de réglage ne sont qu'indicatifs. Le réglage que vous choisirez devrait dépendre des capacités et préférences de l'utilisateur. Si vous choisissez un réglage plus faible, l'abaissement dans le fauteuil se fera toujours en douceur, mais la poussée sera plus faible lors du mouvement ascendant.)

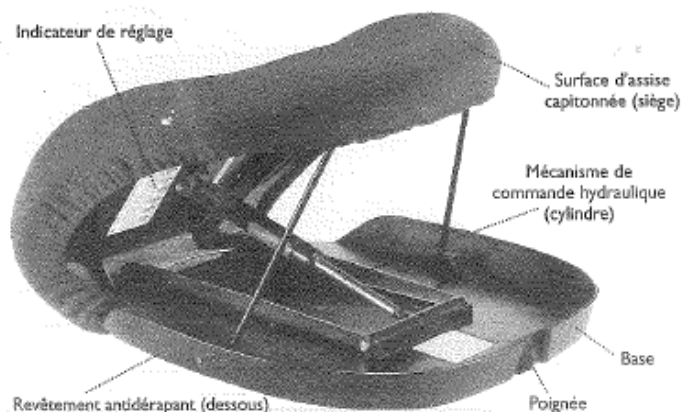

### **S'asseoir avec Upeasy :**

Après avoir ajusté les réglages de poids et placé upeasy dans votre fauteuil, asseyez-vous sur la partie supérieure plate du upeasy. Upeasy vous glissera lentement et en douceur dans votre fauteuil. (Remarque : si votre upeasy ne s'abaisse pas quand vous vous asseyez dessus, ajustez le réglage à un poids plus faible).

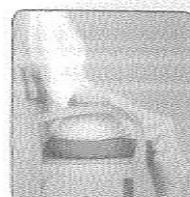

### **Se lever avec Upeasy :**

Quand vous êtes prêt à vous mettre debout, commencez simplement à vous lever comme vous le feriez normalement, tout en vous penchant vers l'avant et en poussant avec bras et vos jambes. Upeasy sentira que vous êtes en train de vous lever et il vous soulèvera lentement et en douceur.



### **Housse en tissu amovibles :**

L'upeasy est expédié avec une housse bleu marine, lavable à la machine.



### **Pour mettre la housse :**

Après avoir ajusté le réglage du poids de votre siège releveur, placez le sur un table avec la partie repliée vers vous.

Couvrez le dossier (la partie supérieure) du Upeasy avec le côté de la housse portant l'étiquette et tirez la housse vers le bas pour la placer sous le bord avant du coussin.

Notez : le dos (le haut) de la housse est plus large que le devant afin qu'elle soit bien ajustée. Il est préférable de laisser tout ou partie de l'étiquette sur la housse afin de pouvoir identifier le dos (le haut) à l'avenir.

### **Installation dans la fauteuil :**

De manière générale, le siège releveur devrait dépasser de l'avant du siège tel que le montre l'illustration. Avec les fauteuils qui sont très profonds et qui ont assez de capitonnage, on peut installer Upeasy plus en arrière. Pendant qu'on utilise upeasy, il faut garder les deux mains sur les accoudoirs du fauteuil (ou sur tout autre support approprié). Upeasu doit dépasser du siège tel que le montre l'illustration quand on l'utilise dans un fauteuil non rembourré.



### **Entretien de votre Upeasy :**


La surface du coussin du siège releveur est enduite d'un revêtement spécial hydrofuge. La surface du coussin peut être nettoyée avec un éponge et un savon ou détergent doux (ne plongez jamais l'upeasy complètement dans l'eau). La housse amovible est 100% polyester et peut être lavée à la machine et sécher en la pendant.

### **Replier Upeasy pour le transport :**


En suivant la même méthode que pour régler le poids, amenez le piston à glisser au-dessous du réglage le plus bas.

Repliez l'upeasy et fixez la bande velcro au support velcro qui se trouve sur la poignée.

Replier UPEASY pour le transport

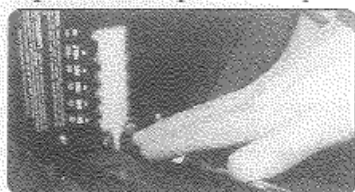

En suivant la même méthode que pour régler le poids, amenez le piston à glisser au-dessous du réglage le plus bas.

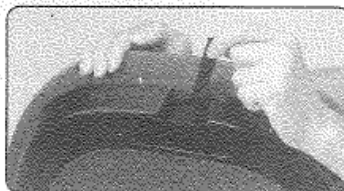

Repliez l'UPEASY et fixez la bande Velcro au support Velcro qui se trouve sur la poignée.

### **Garantie :**

La garantie ne couvre pas les dommages dus à l'usure normale, à la négligence ou à l'usage abusif, et elle n'est pas transférable

Veuillez noter que si vous tentez de réparer ou de modifier vous-même le siège releveur de quelque manière que ce soit, la garantie devient nulle.

Garantie 1 an.