



ACCESSMAN
Sa mission : l'accessibilité

GUIDE D'UTILISATION



ABILITYBROWSER
Le Navigateur Accessible

Français

INFORMATION

Ability Browser est un navigateur destiné aux personnes ne pouvant faire usage d'un clavier traditionnel, ou d'une souris.

Grâce à la technologie Head Pilot, l'utilisateur contrôle le curseur par les seuls mouvements de la tête et la webcam de son ordinateur. Un clic est généré par temporisation lorsque celui-ci cesse son mouvement.

Le logiciel analyse le flux vidéo de la webcam (interne ou externe) et déplace le curseur. Des fonctions et aides techniques sont intégrées afin d'en faciliter l'utilisation. Un menu apparaît quand le curseur se positionne sur la bordure droite de l'écran.

Ability Browser inclut un moteur de recherche qui référence les sites partenaires. Par défaut, tous les autres sites disposent d'une accessibilité de 5 minutes par jour.

N'hésitez pas à nous soumettre vos sites favoris

En attendant : Bon Surf'




INSTALLATION

Télécharger **GRATUITEMENT** le navigateur





via le site access-man.com puis l'installer sur votre ordinateur*

équipé d'un système d'exploitation

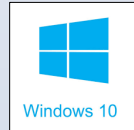

ou

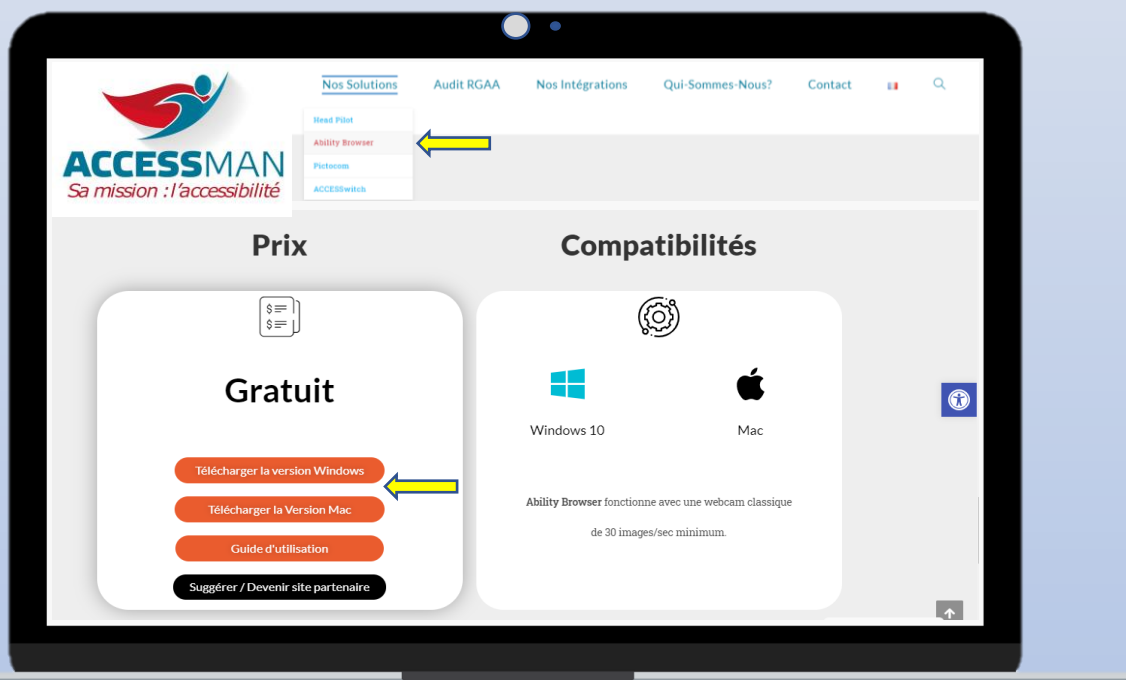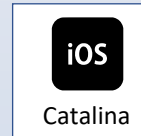

* L'ordinateur doit être équipé d'une webcam interne, ou externe. Ability Browser nécessite son utilisation permanente.



Une tierce personne peut être nécessaire pour accompagner l'utilisateur final dans les phases d'installation et de configuration initiale.

UTILISATION

1

Démarrage du programme




La webcam et le système de contrôle du curseur Head Pilot s'activent dès le démarrage.



Déplacer votre tête et piloter le curseur.
Lors que le curseur reste statique un clic est généré.

- Si nécessaire : activer Head Pilot


Paramètre

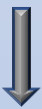



Head Pilot



Général

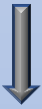

Activer le contrôle du curseur

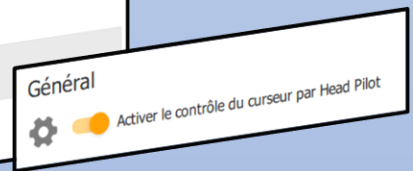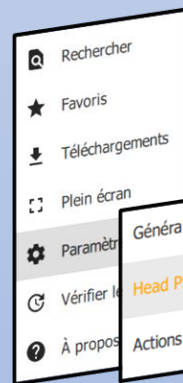


- Puis activer le clic auto



2

Fonctions

Au cours de la navigation, cliquer sur un champ de texte pour utiliser le clavier virtuel.

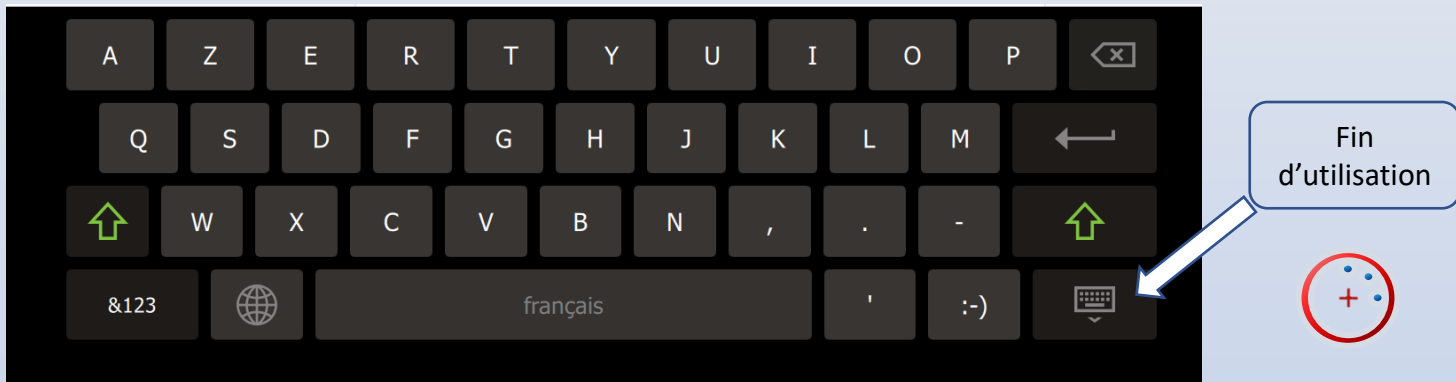

Activer / Désactiver le clic automatique

Choix du mode de clic

Activer / Désactiver la loupe

Accéder au Favoris

Activer / Désactiver la magnétisation du curseur

Accéder au menu Paramètres

3

Paramétrage des fonctions

➤ Menu Général

Page de démarrage
http://www.access-man.com/abilitybrowser/abilitybrowser_fr.html
 Lancer l'application au démarrage

L'application se lancera au démarrage de l'ordinateur

Langue
French

Choix de la langue Anglais / Français

Caméra
 Afficher la caméra EasyCamera
 Afficher la caméra au démarrage Durée 10 s

Activer le retour camera tout au long de l'utilisation.
Paramétrer la durée d'affichage

Défilement
 Activer le défilement
Durée d'attente avant le défilement 750 ms

Permet les défilements Haut/Bas de la page web active.
Positionner le curseur en haut ou bas de page et stopper le mouvement.
Paramétrer le temps avant l'activation de la fonction.

Clavier virtuel
 Activer le clavier virtuel

Permet de déployer le clavier virtuel dans les champs de texte..


Moteur de recherche
 Ability Browser
 Google
 Bing
 DuckDuckGo

Choix du moteur de recherche.



En cas de recherche dans la barre URL uniquement


➤ Menu Head Pilot

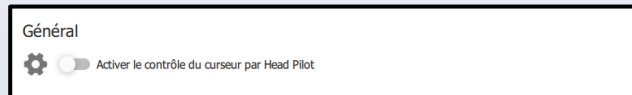


Déclenche le mode de contrôle par les mouvements de la tête.




Régler les conditions de sensibilité en fonction de la distance avec la caméra ou du handicap de l'utilisateur. Lier ou dissocier les paramètres.

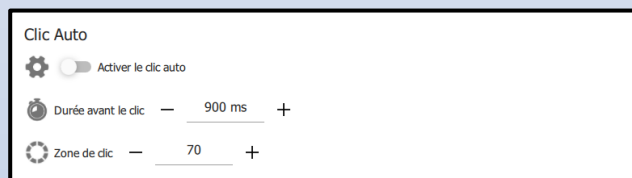


Déclenche le clic automatique par temporisation. Régler le temps avant l'action. La zone de clic détermine la zone à l'intérieur de laquelle un second clic ne se déclenchera pendant cette temporisation. Sortir et entrer de la zone pour le réactiver.

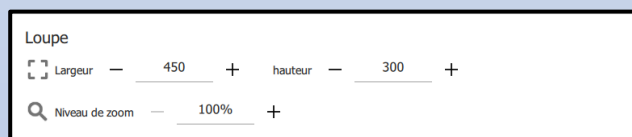

Gérer la taille et l'agrandissement de la loupe. Son utilisation se déclenche dans le menu verticale disponible au cours de la navigation.

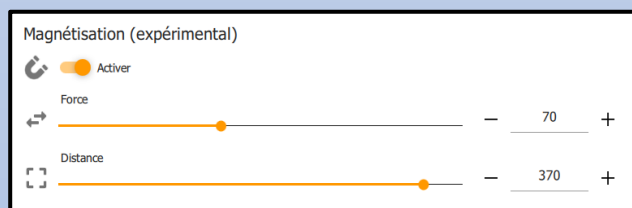


La magnétisation attire le curseur vers la zone cliquable la plus proche. Cette fonction s'emploie avec précaution. Elle ne correspond aux besoins de certains utilisateurs et gêner leur navigation. 

➤ Menu Actions



La Barre d'Actions accompagne l'utilisateur au cours de sa navigation. Elle peut être visible ou non.

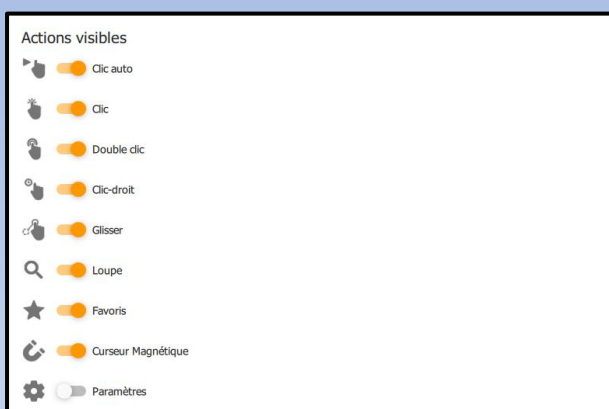

Choix des actions visibles.

EDITEUR

Access-Man remercie tous les sites partenaires pour un web accessible au plus grand nombre.



29 rue Jean-Louis Cartigny,
Quartier Koenig
14 760 Bretteville sur Odon
02 31 74 18 82
contact@access-man.com
www.access-man.com